

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die digitale Insertion von DILAPAN-S (ohne Spekulum)

1. Vorbereitung




Sie benötigen sterile Handschuhe, eine Schwammzange, steriles Wasser oder ein Gel-Gleitmittel sowie einige ungeöffnete DILAPAN-S-Dilatoren.



Führen Sie eine vaginale Untersuchung wie bei einer Blasensprengung durch. Halten Sie die Zervix mit Ihren Fingern fest.


2. Einführen des ersten Dilators

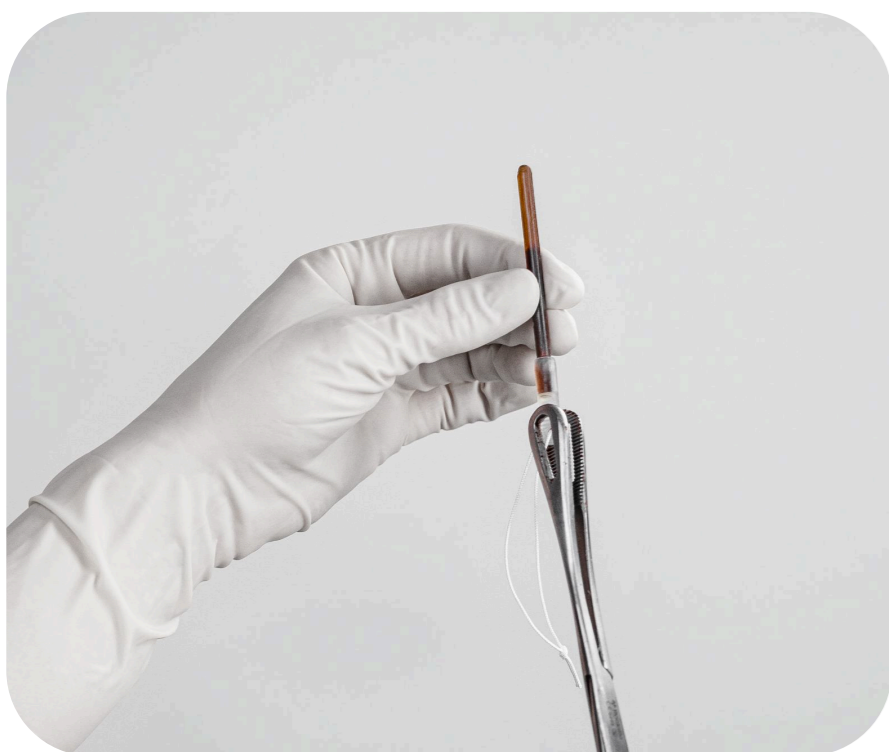

Greifen Sie den ersten Dilator mit der Schwammzange, sodass Sie von der zusätzlichen Länge profitieren können, und geben Sie Gleitmittel auf die Dilatorspitze.*



Stellen Sie sich die Schwammzange und den Dilator wie einen Fruchtblasensprenger vor. Führen Sie den Dilator entlang Ihrer Finger durch den äußeren und inneren Muttermund. Möglicherweise spüren Sie einen Widerstand, bis der Dilator den inneren Muttermund passiert hat.

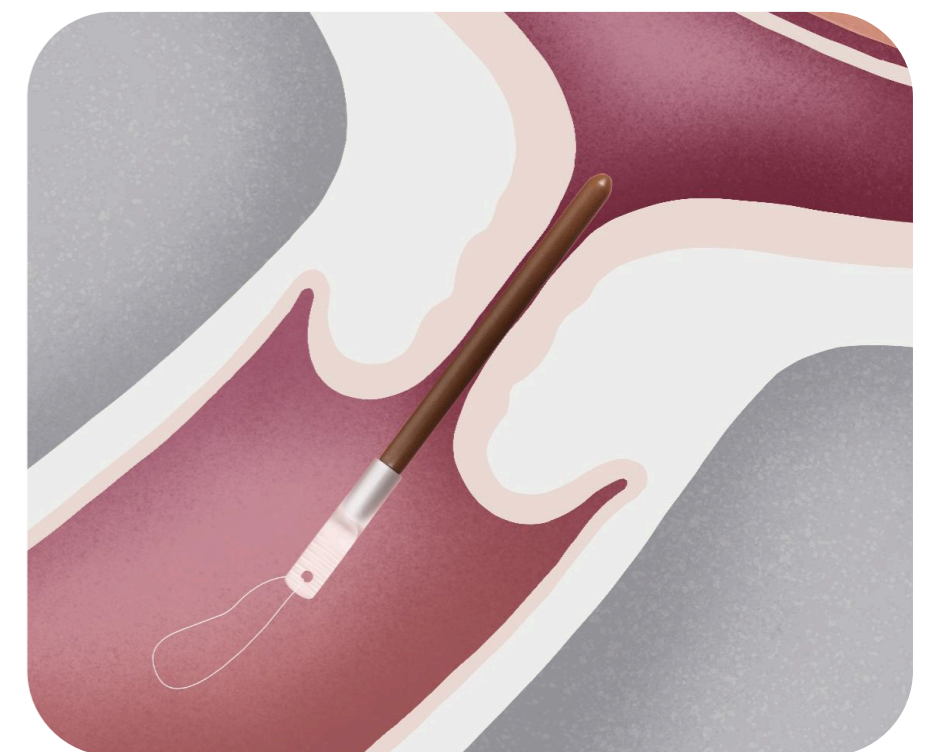


Lassen Sie beim ersten Dilator einen Abstand von ca. 1 cm zwischen dem Griff und der Zervix. Dies hilft Ihnen bei der Platzierung der weiteren Dilatoren.

3. Einführen der weiteren Dilatoren und Abschließen des Vorgangs



Halten Sie die Zervix während des gesamten Vorgangs mit Ihren Fingern fest, um den Patientenkomfort zu erhöhen. Fahren Sie mit dem Einführen der restlichen Dilatoren durch den äußeren und inneren Muttermund fort.

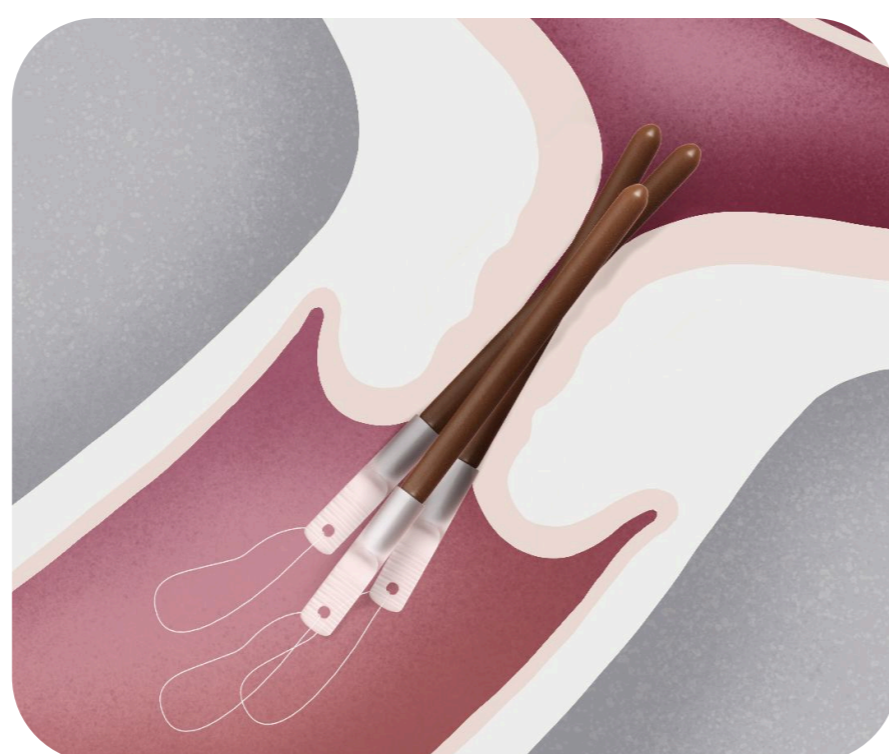

Passen Sie schließlich die Position des ersten Dilators an, indem Sie ihn vollständig bis zum Griff einführen. Stellen Sie sicher, dass nur die Griffe außerhalb der Zervix verbleiben und dass alle Kunststoffgriffe gleich ausgerichtet sind. Notieren Sie die Anzahl der platzierten Dilatoren.

4. Entfernen



Normalerweise ist hierfür kein Spekulum notwendig. Ziehen Sie vorsichtig an den Bändchen. Die Dilatoren können in der Regel in einem Bündel entfernt werden.




Notieren Sie die Anzahl der entfernten Dilatoren, und vergleichen Sie diese mit der Anzahl der eingeführten Dilatoren.


Dilapan-S | **medicem**

Dies ist eine kurze Anleitung zum Einführen und Entfernen von DILAPAN-S. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts stets die Gebrauchsanweisung. DILAPAN-S wird von der Firma MEDICEM Technology s.r.o., Tschechische Republik, hergestellt (www.medicem.com).

Schulungsvideo ansehen

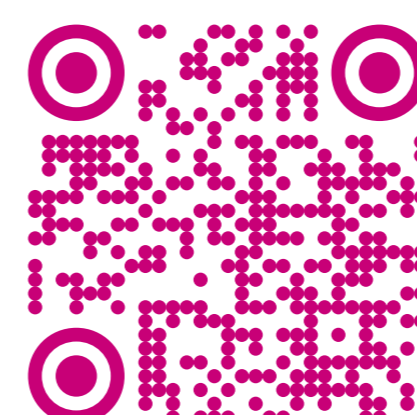

DILAPAN-S-Website besuchen

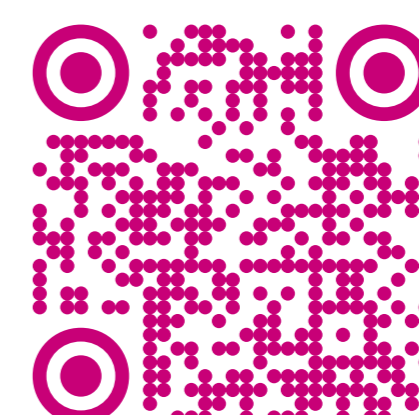

* Bitten Sie einen Kollegen, den Dilator in die Schwammzange einzulegen.